


Test Catalyst Cortisol

Odblokuj komentarze interpretacyjne specyficzne dla wyniku

Komentarze interpretacyjne dołączone do testu Catalyst™ Cortisol mogą pomóc w ustaleniu najlepszego dalszego postępowania dla pacjenta. Aby w pełni wykorzystać te ważne informacje, rozważ następujące pytania i wykonaj poniższe czynności:

- + **Czy wykonujesz wiele oznaczeń kortyzolu u tego samego pacjenta?** Jeśli tak i wykonano już wstępne oznaczenie kortyzolu, postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi w części „Przeprowadzanie dodatkowych oznaczeń...”, aby upewnić się, że każdy wynik ilościowy zostanie pogrupowany sekwencyjnie oraz aby uzyskać dostęp do **kompleksowych komentarzy interpretacyjnych**.
- + **Czy wprowadzono informacje o protokole?** Aby otrzymać komentarze interpretacyjne dotyczące konkretnych wyników, wybierz właściwy protokół i etap protokołu dla analizy pacjenta – upewnij się, że postępujesz według przedstawionego poniżej protokołu właściwego dla danego analizatora:

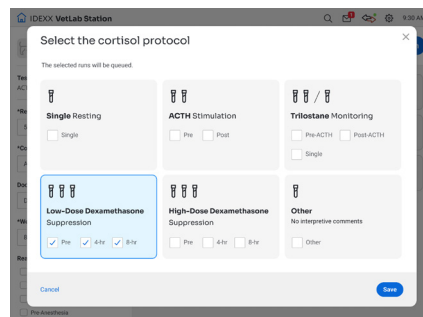

Przeprowadzanie wstępnych oznaczeń kortyzolu

Analizator biochemiczny Catalyst One™



Rozpocznij analizę w stacji IDEXX VetLab™ Station. Na ekranie Wybierz urządzenie dotknij ikony **Catalyst One**, a następnie naciśnij przycisk **Kortyzol**. Wybierz żądany protokół i dodatkowe etapy protokołu, naciśnij przycisk **Zapisz**, a następnie **Uruchom**.

Przeprowadzanie dodatkowych oznaczeń / wieloetapowe oznaczanie kortyzolu

Wszystkie etapy protokołu wybrane podczas przetwarzania pierwotnego testu zostaną wyświetlone na liście analiz w toku na ekranie głównym stacji IDEXX VetLab Station. Kiedy kolejna próbka będzie gotowa do przetworzenia, naciśnij kolejny dostępny test na liście, a następnie naciśnij przycisk **W kolejce** i **Rozpocznij cykl**.

Analizator biochemiczny Catalyst Dx™



Rozpocznij analizę w zwykły sposób w stacji IDEXX VetLab Station. Po zakończeniu cyklu zgodnie z monitem zidentyfikuj protokół i etap protokołu, a następnie naciśnij przycisk **Wyślij**.

Uwaga: aby to zmienić, dotknij danych pacjenta na liście W toku, dotknij przycisku **Dodaj szczegóły**, a następnie wybierz etap protokołu właściwy dla danego pacjenta.

Aby upewnić się, że wyniki dodatkowego oznaczenia zgrupowano z wynikiem pierwotnego oznaczenia i otrzymać komentarze interpretacyjne, wykonaj poniższe czynności:

1. Znajdź wyniki pierwotnego oznaczenia kortyzolu danego pacjenta w stacji IDEXX VetLab Station **LUB** wybierz właściwego pacjenta z listy oczekujących na ekranie głównym.
2. Naciśnij przycisk **Dodaj test**, a następnie **Dołącz wyniki**.
3. Na ekranie Wybierz urządzenie wybierz **Catalyst Dx**.
4. Po wyświetleniu monitu na zakończenie cyklu wybierz informacje o protokole cyklu i naciśnij przycisk **Wyślij**.

WAŻNE: jeśli dostępne są analizatory Catalyst One oraz Catalyst Dx i chcesz, aby wyniki oznaczenia kortyzolu pacjenta były wyświetlane w trendach lub chcesz wykonać dodatkowe oznaczenia / wieloetapowe oznaczanie kortyzolu, firma IDEXX zaleca wykonanie wszystkich oznaczeń kortyzolu z użyciem tego samego analizatora i typu próbki.

Wyświetlanie wyników ilościowych i komentarzy interpretacyjnych

Naciśnij komunikat z informacją o gotowych wynikach pacjenta wyświetlany w lewym dolnym rogu ekranu stacji IDEXX VetLab Station. Jeżeli oznaczenia dodawane są w ramach wieloetapowego oznaczania kortyzolu, wyniki będą wyświetlane w kolejności od ostatniego dodanego oznaczenia (na górze) do pierwotnego oznaczenia (na dole); kompleksowe komentarze interpretacyjne będą wyświetlane wraz z najnowszymi wynikami.