


Analizator IDEXX VetLab* UA*

Skrócony przewodnik użytkownika

Odczyt pasków IDEXX UA*


Używaj świeżego moczu, który nie był wirowany. Dokładnie wymieszaj próbkę moczu. Próbka powinna mieć temperaturę pokojową w momencie przeprowadzania testu i nie powinna stać dłużej niż godzinę.

Dalsze instrukcje znajdują się w *Instrukcji obsługi analizatora IDEXX VetLab* UA**.

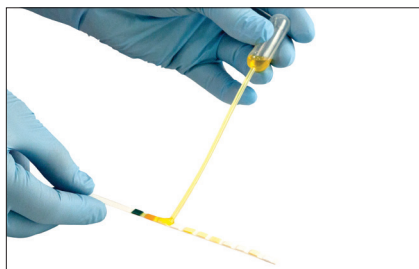

- 1 Za pomocą pipety zalej pasek UA próbką moczu, upewniając się, że wszystkie pola testowe są zwilżone. Nie zginaj paska.

WAŻNE: Z analizatorem IDEXX VetLab UA można używać wyłącznie pasków IDEXX UA. Nie wolno używać pasków innej marki.

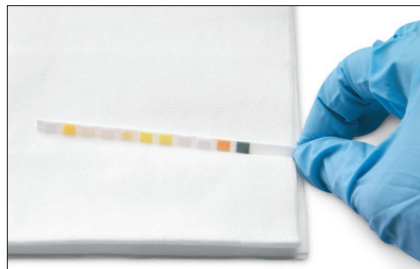

- 2 Krótco (przez mniej więcej jedną sekundę) potrzyj długą krawędź, a następnie tył paska testowego o chłonną powierzchnię (np. ręcznik papierowy).



- 3 Umieść pasek testowy polami testowymi skierowanymi do góry na podajniku pasków testowych, tak aby jego przednia krawędź była przytrzymywana przez zacisk w szczelinie. Słupek blokujący musi być otwarty. Pod zaciskiem należy umieścić około 2 mm paska.



- 4 Naciśnij przycisk **Start**. Zostanie wyemitowany sygnał dźwiękowy. Podajnik lekko się przesunie, a słupek blokujący zamknie się.

Podajnik pasków testowych automatycznie wciąga pasek testowy do analizatora, aby można go było odczytać, a następnie powraca do pozycji początkowej. Nie wyjmuj paska testowego, dopóki analizator nie powróci do trybu gotowości do pomiaru. Od naciśnięcia przycisku Start do zakończenia wszystkich pomiarów mija około 80 sekund.



- 5 Po wydrukowaniu wyników wyjmij i wyrzuć pasek testowy. Wytrzyj resztki moczu z podajnika niestrzępiącą się ściereczką.

UWAGA: Jeżeli analizator UA jest podłączony do IDEXX VetLab Station, wyniki badań są przesyłane automatycznie.

Dział pomocy technicznej firmy IDEXX

Europa idexx.eu

Polska 48 223062477

Republika Czeska 420-239018034

Słowacja 421-268622417