

Pobieranie i przygotowywanie próbek do badań hematologicznych

1. Użyj odpowiedniej probówki z EDTA.

Użyj jednej z następujących probówek:

- Standardowa probówka z EDTA (na przykład IDEXX VetCollect[®])
- Mikroprobówka (dostępna do stosowania wyłącznie z analizatorem hematologicznym ProCyte Dx[®] i analizatorem hematologicznym ProCyte One[®])

Napełnij probówkę zgodnie z zaleceniami jej producenta.

¹Probówki IDEXX VetCollect są wymagane do analizatora hematologicznego LaserCyte[®] i analizatora hematologicznego LaserCyte[®] Dx.



Probówka do pobierania próżniowego

2. Użyj odpowiedniego zestawu do pobierania próbki.

Użyj strzykawki albo systemu pobierania próżniowego.

Użyj odpowiedniego rozmiaru igły dla pacjenta.



System pobierania próżniowego




Strzykawka

3. Pobierz próbkę.

- W przypadku korzystania ze strzykawki niezwłocznie umieść próbkę w probówce z EDTA.
- W przypadku korzystania z probówki próżniowej wbij igłę strzykawki w gumowy korek probówki do pobierania próżniowego. Próżnia spowoduje pobranie prawidłowej objętości próbki. Jeżeli próbka nie przepłynie na początku do probówki, **delikatnie** wciśnij tłok strzykawki, aby próbka zaczęła przepływać.

WAŻNE: napełnij probówkę zgodnie z zaleceniami producenta.

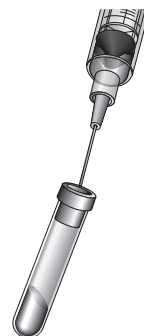

4. Wymieszaj próbkę.

Obracaj próbkę 10 razy w dłoni (i delikatnie).



Uwaga dotycząca próbek poddawanych analizie z zastosowaniem analizatora LaserCyte albo analizatora LaserCyte Dx: w przypadku zdjęcia korka z probówki z EDTA (z dowolnej przyczyny), probówkę należy odpowietrzyć poprzez wbicie igły w korek, aby wyrównać ciśnienie powietrza przed umieszczeniem probówki w urządzeniu.

