


Uzyskaj więcej informacji z wyników morfologii krwi dzięki narzędziom interpretacyjnym

Nieustające starania IDEXX o zapewnianie jak najwyższej jakości wyników badań pacjentów gabinetów weterynaryjnych zaowocowały stworzeniem **narzędzi interpretacyjnych do Analizator hematologiczny ProCyte One***. Narzędzia te umożliwiają uzyskanie szerszej wiedzy o pacjencie na podstawie wyników pełnej morfologii krwi (CBC).

W narzędziach interpretacyjnych zastosowano zastrzeżone algorytmy, wykrywające w wynikach CBC określone schematy. Narzędzia te, w połączeniu z wykresami Dot Plot, dostarczają przydatnych informacji i wskazówek, ułatwiających interpretację wyników badań.

Narzędzia interpretacyjne można znaleźć w wynikach zintegrowanych z systemem IDEXX VetLab* (poniżej wyników morfologii i wykresów Dot Plot – po prawej stronie), a także w VetConnect* PLUS.

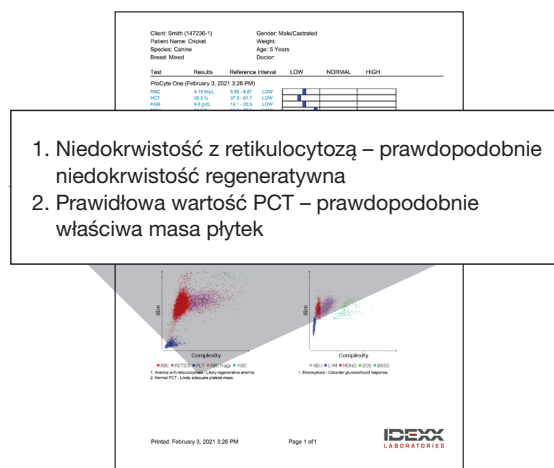

Jeśli analizator wykryje...	Narzędzie interpretacyjne powie...
• lub ▼RETIC i ▼HCT	Niedokrwistość bez retikulocytozy – prawdopodobnie niedokrwistość nieregeneratywna; rozważyć niedokrwistość „pre-regeneratywną”
▲RETIC i ▼HCT	Niedokrwistość z retikulocytozą – prawdopodobnie niedokrwistość regeneratywna
▼LYMPH	Limfopenia – prawdopodobnie leukogram stresowy (odpowiedź na glikokortykosteroidy) Potwierdź badaniem rozmazu krwi
▲MONO	Monocytoza – rozważyć stan zapalny <i>LUB</i> Monocytoza – rozważyć stan zapalny (w przypadku limfopenii rozważyć odpowiedź na glikokortykosteroidy)
▲RDW	Zwiększone RDW – obecna anizocytoza – zweryfikować w rozmazie krwi
▼PLT choć •PCT	Prawidłowe PCT – prawdopodobnie prawidłowa masa płytek krwi
▼HCT, ▼MCHC oraz ▼MCV	Mikrocytarna niedokrwistość hipochromiczna – prawdopodobnie niedokrwistość z niedoboru żelaza
▲HCT	Zwiększony HCT – czerwienica
▲RETIC oraz • lub ▲HCT	Retikulocytoza bez niedokrwistości – rozważyć utajoną chorobę hemolityczną albo utratę krwi
▲MCHC lub ▲MCH, albo oba wyniki	Podwyższona wartość MCHC lub MCH – rozważ hemolizę (w tym pobranie/transport próbki), lipemię i ciała Heinza
▲RETIC feline	Retikulocytoza – sprawdź polichromazję rozmazem krwi
▲PLT	Wykryto zlepy płytkowe. Liczba płytek może być wyższa niż stwierdzona

Objaśnienia:

▲ Powyżej przedziału referencyjnego

▼ Poniżej przedziału referencyjnego

• W przedziale referencyjnym