

Analizator SNAP Pro

Analizator SNAP Pro* to narzędzie służące do automatyzacji testów przeprowadzanych u zwierząt domowych, które przesyła wyniki do elektronicznej dokumentacji medycznej pacjenta, dzięki czemu oszczędza czas i pieniądze. Wprowadzenie SNAP Pro zapewniło korzyści płynące z automatyzacji, ale nadal konieczne było ręczne wprowadzanie wyników testów SNAP*. Dzięki nowej funkcji ProRead* w analizatorze SNAP Pro* wyniki testów SNAP są odczytywane automatycznie, co wyeliminowało kolejny krok w procedurze SNAP i sprawiło, że SNAP Pro jest jeszcze bardziej wartościowy.


Wyświetlanie wyników ProRead

Przeprowadź test SNAP z użyciem preferowanej procedury. Po zakończeniu analizy można zauważyć, że ekran Results (Wyniki) wygląda podobnie do tego, jak wyglądał bez funkcji ProRead. Różnica polega na tym, że teraz wyniki są wprowadzane automatycznie – użytkownik nie musi już czytać okna wyników i osobno wpisywać każdego dodatniego lub ujemnego wyniku.

Oprócz automatycznego wprowadzania wyników kolor kontrolki stanu na analizatorze będzie się różnił w zależności od uzyskanych wyników. Jeśli kontrolka stanu ma kolor...

- **Zielony** – wszystkie wyniki są ujemne
- **Niebieski** – co najmniej jeden wynik jest dodatni
- **Żółty** – wynik może wymagać sprawdzenia ze względu na bardzo jasne plamy lub nieoczekiwane zmiany zabarwienia (takie jak zanieczyszczenia lub niebieski odcień) w oknie wyników. Jeśli użytkownik zgadza się z wyświetlanymi wynikami, należy dotknąć ikony **zaznaczenia** ✓, aby zapisać wynik. W przeciwnym razie należy dotknąć odpowiedniej ikony wyniku, a następnie dotknąć ikony **zaznaczenia** ✓. Aby anulować test i powrócić do ekranu głównego, naciśnij ikonę zamykania ✗.

Kolor kontrolki stanu wskazuje status wyniku.

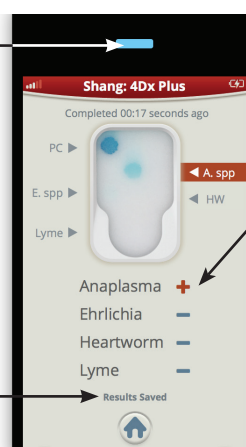

Wyniki dodatnie są oznaczone kolorem czerwonym.

Wyniki są zapisywane automatycznie.


Zielony =
wszystkie wyniki są **ujemne**.



Niebieski =
co najmniej jeden wynik jest **dodatni**.



Żółty =
do ukończenia analizy wymagana jest interakcja ze strony użytkownika.

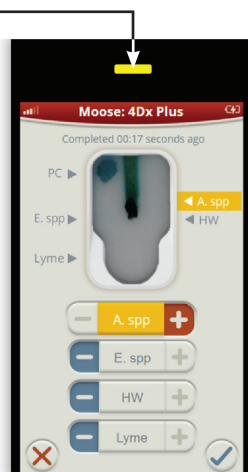

Potrzebujesz pomocy?
Odwiedź stronę idexx.com/prohelp, aby uzyskać pomocne filmy instalacyjne i dokumentację pomocniczą.